



INSTRUCTIONS :

STERILISATION ET NETTOYAGE DES TROUSSES CHIRURGICALES IDI

- 1/ Sortir tous les instruments de leur logement.
 - 2/ Nettoyer les instruments dans le bac à Ultrasons pendant 15 minutes avec une solution de décontamination.
 - 3/ Nettoyer le plateau sans les instruments aux ultrasons avec un produit de décontamination pendant 15 minutes.
 - 4/Rincer le tout abondamment à l'eau claire.
 - 5/Sécher l'ensemble.
 - 6/Replacer les instruments dans le plateau avec des gants non poudrés.
 - 7/ Stériliser à l'autoclave à 135 degrés dans le cycle de stérilisation.
- Recommandé pour les instruments chirurgicaux.